




Unomedical

FOR PEOPLE WHO CARE

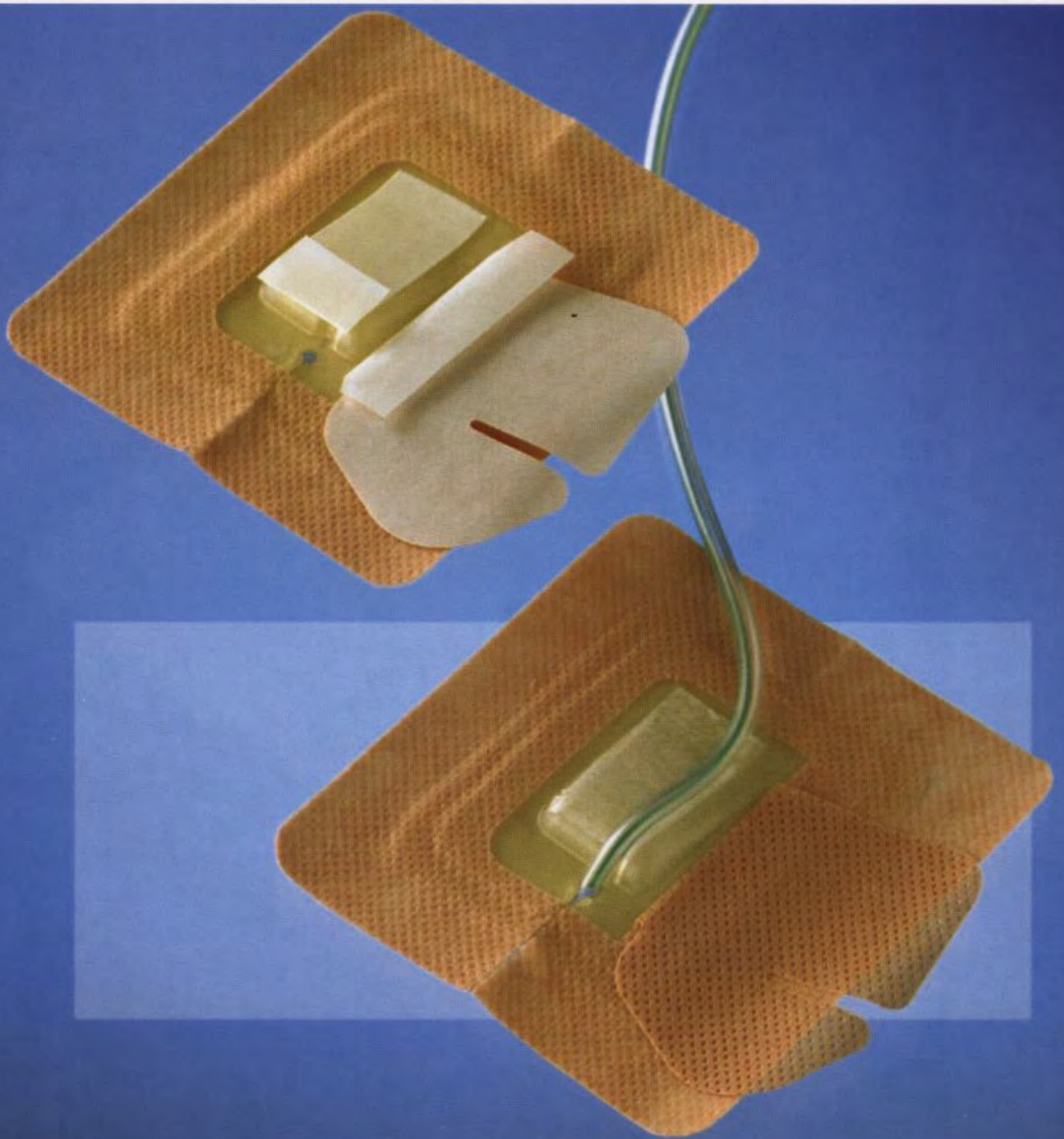

Drain-Fix

**Фиксирующее приспособление
для перкутанных катетеров и дренажей**

Drain-Fix

Фиксирующее приспособление для перкутанных катетеров и дренажей

Для фиксации:

катетеров типа Пигтэйл, баллонных катетеров, надлобковых катетеров, перкутанных гастростомических катетеров (чрескожной гастростомии), хирургических послеоперационных дренажей.

Для сокращения времени по уходу за дренажом:

Дрейн-Фикс – это стерильное фиксирующее устройство для перкутанных катетеров и трубок диаметром от 5СН до 22 СН (размеры по Шарьеру).

Дрейн-Фикс специально разработан для предотвращения смещения, миграции, перегибания и случайного выскальзывания катетера.

Дрейн-Фикс обеспечивает безопасную фиксацию к коже пациента, благодаря которой случаи смещения, либо повторной установки катетера становятся исключительно редкими. Использование устройства Дрейн-Фикс позволяет существенно уменьшить время по уходу за катетером, а также сэкономить значительные средства, затрачиваемые на установку новых катетеров при их дислокации.

Для предотвращения перегибания катетеров:

Фиксирующее устройство Дрейн-Фикс снабжено рельефной платформой из пластичного поддерживающего материала. Благодаря наличию рельефной платформы катетер удерживается в устройстве Дрейн-Фикс в устойчивом, параллельном поверхности кожи положении, что предотвращает риск перегибания катетера.



Артикул	Описание изделия	Размер катетера/ трубки	Количество во внутренней упаковке	Количество в транспортной коробке
680M	малый	5 СН-14 СН	25	200
685M	большой	12 СН-22 СН	20	160

Спецификация материалов

Обрамляющая рамка:	нетканый полипропилен розового цвета
Адгезив:	акриловый клей медицинской степени очистки
Адгезивная центральная часть:	слой гидроколлоида толщиной 0,6 мм
Рельефный компонент:	термопластичный эластомер
Верхнее защитное покрытие:	бумага, силиконизированная с одной стороны
Покрытие поверхности, контактирующей с кожей:	крафт-бумага с полиэтиленовым покрытием, с односторонней силиконизацией
Упаковка:	ламинированный полиэтилен/полиэфир
Стерилизация:	стерилизовано гамма-радиацией
Срок годности:	3 года
Длительность стояния:	7 дней

Все защитные фиксирующие изделия производства Уномедикал не содержат латекс

Для комфорта пациентов:

Фиксирующее устройство Дрейн-Фикс состоит исключительно из материалов, благоприятно воздействующих на кожу пациента, включая гидроколлоид, обладающий защитными и абсорбирующими свойствами. Дрейн-Фикс способен длительно удерживаться на коже, не вызывая раздражения или аллергических реакций. При этом пациент не стеснен в движениях, а благодаря низкой профильности устройства может лежать в постели и одеваться без особых ограничений. Кроме того, пациент может принимать душ в течение периода «ношения» устройства Дрейн-Фикс. Фиксирующее устройство предотвращает сдвиги катетера, которые приводят к осаднению краев и расширению пункционного отверстия, благодаря чему уменьшаются нежелательные протечки в этой зоне.



Простая установка и снятие фиксирующего приспособления:

Дрейн-Фикс легко фиксируется на коже (см. пиктограмму внутри упаковки), катетер прокладывается в ложбинке на рельефной платформе, дополнительно фиксируется к устройству свободными клейкими лепестками из нетканого материала, освобожденными от защитного бумажного покрытия. Фиксирующее устройство Дрейн-Фикс удаляется легко, без смещения катетера.

Все изделия Unomedical имеют CE-марку в соответствии с директивой 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях.

ЗАО «Уномедикал»
101000, Россия, Москва
Б. Златоустинский пер., 1, стр.1
Тел. + 7 495 748 78 84
Факс + 7 495 748 78 94
www.unomedical.ru

Unomedical a/s
Birkerød Kongevej 2
DK-3460 Birkerød
Denmark
Phone +45 48 16 70 00
Telefax +45 48 10 30 00