




Как использовать плоские пластиковые пластины Combihesive® 2S

Приклеивание пластины

- [1] Тщательно промойте кожу вокруг стомы теплой водой с мылом. Мыло не должно содержать в своем составе масел и кремов. Тщательно просушите кожу. Руки и кожа вокруг стомы должны быть сухими и чистыми и не должны подвергаться воздействию растворителей и жиросодержащих веществ.
 - [2] Не удаляйте прозрачную пленку со стороны адгезивной поверхности пластины и защитную бумагу с воротника пластины. Приложите пластину к стоме для определения ее формы и размера. Пальцами раскатайте адгезив пластины по направлению от центра. Придерживайте пластину напротив стомы во время формирования отверстия для контроля за его формой и размером.
 - [3] После формирования отверстия для стомы удалите прозрачную пленку с адгезивной поверхности пластины и немедленно приложите пластину к коже. Расположите пластину так, чтобы стома находилась в центре отверстия и приклейте пластину.
- Внимание:** Вырезание отверстия в пластиковых пластинах ножницами запрещено.
- [4] Пальцами раскатайте адгезив по направлению к стоме для обеспечения полного ее охватывания. Благодаря эластичному адгезиву и Технологии запоминания формы «Rebounding Memory Technology» пластиковый адгезив облегает стому и закрывает незащищенную кожу.
 - [5] Разгладьте адгезив по периметру стомы, прижимайте пластину к коже не менее 30 секунд для ее надежной фиксации.

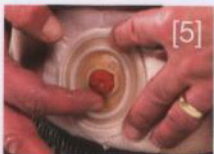

- [6] Удалите белую защитную бумагу с гибкого гидроколлоидного воротника пластины и приклейте его к коже, разгладив образовавшиеся складки.



Прикрепление мешка

- [7] Перед использованием аккуратно расправьте мешок, чтобы впустить в него небольшое количество воздуха.



- [8] Сопоставьте пластиковое кольцо мешка с фланцем пластины. Прикрепление мешка к пластине начинайте снизу, прижимая кольцо к фланцу по кругу. При прикреплении мешка можно услышать несколько щелчков.



Уход за плоскими пластичными пластинами Combihesive® 2S с гибким гидроколлоидным воротником

- Края воротника могут свернуться при намокании. Промокните воротник, разгладьте образовавшиеся складки и прижмите к коже.
- Избегайте попадание на гидроколлоидный воротник жиросодержащих веществ, кремов и растворителей.

Удаление пластины

Осторожно удалите пластину, придерживая кожу. Для очищения кожи от остатков адгезива рекомендуется использовать салфетки для удаления адгезива ConvaCare®.

Название	Код изделия	Количество в упаковке	Диаметр фланцевого кольца / Диаметр отверстия для стомы
Пластины пластичные плоские Combihesive® 2 S	411825	5	45мм / 13-22мм
Пластины пластичные плоские Combihesive® 2 S	411827	5	45мм / 22-33мм
Пластины пластичные плоские Combihesive® 2 S	411829	5	57 мм / 33-45мм
Пластины пластичные плоские Combihesive® 2 S	411831	5	70 мм / 45-65 мм