

UnoMeter™ Safeti™ Plus

Инструкция по применению


1 Крепление




Зафиксируйте UnoMeter™ Safeti™ PLUS на раме кровати при помощи ремней, крючков или/и шнура



Убедитесь, что сливной кран закрыт и повернут вверх

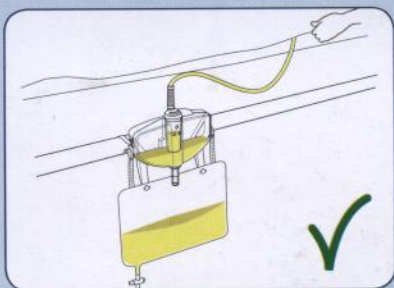


Удостоверьтесь, что приводная трубка размещена правильно

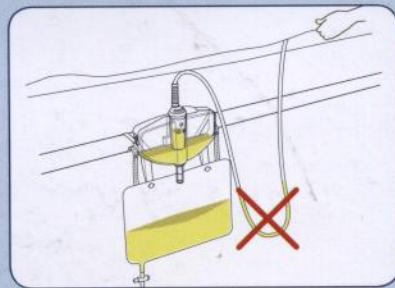


Избегайте провисания приводной трубки с образованием петли

2 Использование

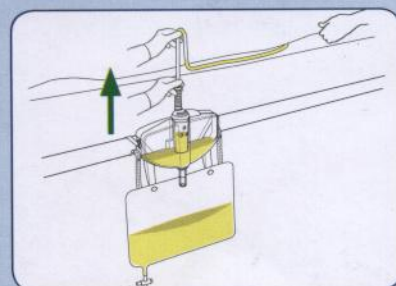

Поднимите приводную трубку и удерживайте ее над камерой до полного ее опорожнения

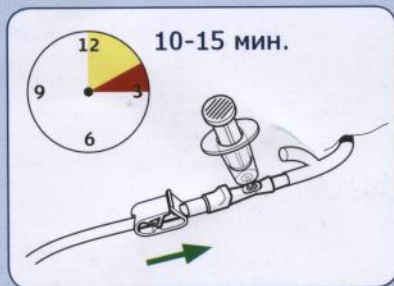

Перед взятием пробы мочи наложите зажим на трубку рядом с портом для забора пробы мочи



вставьте кончик шприца Люэра
поверните по часовой стрелке для надежной фиксации
медленно произведите забор пробы мочи

Kombikon™ – порт для взятия проб мочи шприцем без использования иглы

3 Транспортировка пациента

Во время транспортировки больного положите систему UnoMeter™ Safeti™ PLUS на кровать лицевой стороной вверх

